



Aldehydfreies Schnell-
Desinfektionspräparat
auf Basis von Alkoholen.

terralin® liquid

Unser Plus:

- aldehydfrei
- gebrauchsfertig
- sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
- schnelle, fleckenfreie Abtrocknung

Anwendungsgebiete

Alkoholische Schnelldesinfektion für Medizinprodukte [C € 0297] in allen Krankenhausbereichen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten, wie z. B.:

- Patientenbehandlungseinheiten mit angrenzenden Flächen
- Untersuchungsliegen
- OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen
- Oberflächen medizinischer Geräte

Anwendungshinweise

terralin® liquid ist eine gebrauchsfertige Lösung. terralin® liquid unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Ausbringung maximal 50 ml/m². Ggf. überschüssige Präparatemengen mit ungefärbtem Einmaltuch entfernen.

Mikrobiologische Wirksamkeit

terralin® liquid wirkt gegen:

- Bakterien (inkl. Tb) • Pilze • Hepatitis-B-Viren • HIV • HCV
- Adeno-Viren • Rota-Viren • Papova-Viren • Polio-Viren

Anwendungskonzentration / Einwirkzeit

Wirksamkeiten	Einwirkzeit
Bakterien, Pilze (C. albicans) (gemäß DGHM-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten)	1 Min.
MRSA Multiresistente Staphylococcus aureus-Stämme	1 Min.
Tb	1 Min.
viruzid*	30 Min.
begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV und HCV)	30 Sek.
Noro-Virus**	1 Min.
Adeno-Viren (Typ 2)	2 Min.
Papova SV 40	15 Min.
Polio-Viren	30 Min.
Rota-Viren	30 Sek.
Vaccinia	30 Sek.
DGHM-Liste / Zertifikat Flächendesinfektion in Krankenhaus und Praxis	5 Min.

* gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01/2004

** geprüft mit neuem Prüfvirus: Murines Noro-Virus (in Anlehnung an die EN 14 476:2007)

terralin® liquid

Produkt Daten

Zusammensetzung:
100 g enthalten: 25 g Ethanol (94 %ig), 35 g 1-Propanol

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen:	klare, farblose Flüssigkeit
Dichte (20 °C):	ca. 0,895
Viskosität:	< 15 s (DIN 53 211)
Temperaturstabilität:	-5 °C bis +40 °C
Flammpunkt:	27 °C (DIN 51 755)

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

Xi:	Reizend.
R10:	Entzündlich.
R41:	Gefahr ernster Augenschäden.
R67:	Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
S23:	Aerosol nicht einatmen.
S26:	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S39:	Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S51:	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Besondere Hinweise

terralin® liquid ist äußerst materialverträglich bei Metallen und Kunststoffen (außer Acrylglas und alkoholempfindlichen Lacken).

Bitte beachten Sie den Brand- und Explosionsschutz beim Einsatz von alkoholischen Desinfektionsmitteln in der BR-Regel „Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst“.
Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen.

Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
1 l-Flasche	10 x 1 l	102 001
10 l-Kanister	1 x 10 l	102 004

Zubehör / Dosierhilfen

	Art. Nr.
1 l-Sprühpumpe	180 112
10 l-Kanisterhahn	135 501
10 l-Kanisterdosierer (20 ml/Hub)	117 101
10 l-Kanisterschlüssel	135 810
Umfülltrichter	117 901
Druckluftspritze	120 001

Für ausführliche Informationen zu unseren Dosiergeräten fordern Sie bitte die Gesamtübersicht „Hygiene-Technik“ an.

Umweltinformationen

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zu unserem Präparat terralin® liquid finden Sie im Internet unter www.schuelke.com

Für Ihre individuellen Fragen:
Customer Care

Telefon: +49 (0)40 521 00-666

E-Mail: info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Schweiz
Telefon +41 (0) 44 - 466 55 44
Telefax +41 (0) 44 - 466 55 33
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Telefon +43 (0) 1 - 523 25 01 - 0
Telefax +43 (0) 1 - 523 25 01 - 60
office.austria@schuelke.com