

# Antifect® FF



Einen Überblick aller zum  
Präparat Antifect® FF  
vorliegenden Gutachten/ Literatur  
finden Sie im Internet unter  
[www.schuelke-mayr.com](http://www.schuelke-mayr.com)  
Für Ihre individuellen Fragen:  
Produkt-/Anwendungsberatung  
Telefon 0 40 / 521 00-666

- formaldehydfrei
- gute Reinigungsleistung

## Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
2-l-Flasche	.5 x 2 l	133401
5-l-Kanister	.1 x 5 l	133402
30-l-Kanister	.1 x 30 l	133403
200-l-Fass	.1 x 200 l	133409

## Präparate-Typ

Formaldehydfreies flüssiges Desinfektionsmittel-Konzentrat

## Anwendungsgebiete

Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten [CE 0297] und von Flächen aller Art in allen Krankenhausbereichen.

Antifect® FF ist auch einsetzbar in kritischen/sensiblen Bereichen, z. B. Produktionsbereichen der Pharma- und Kosmetikindustrie.

## Mikrobiologische Wirksamkeit

Antifect® FF wirkt gegen: ■ Bakterien ■ Pilze  
■ Hepatitis-B-Viren ■ HIV ■ Rota-Viren

## Produktdaten

### ■ Zusammensetzung

100 g enthalten: 10 g Glyoxal, 25 g Benzyl-C12-18-alkyl-dimethyl-ammonium, Chloride  
Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004:  
5 - 15 % nichtionische Tenside, Duftstoffe

### ■ Chemisch-physikalische Daten:

<b>Konzentrat:</b>	
Aussehen:	klare, blaue Flüssigkeit
pH-Wert:	ca. 5
Dichte (20 °C):	ca. 1,05
Viskosität:	unter 15 sec. (Auslaufzeit nach DIN 53211)
Temperaturstabilität:	- 5 °C bis + 40 °C
<b>0,5 %ige Gebrauchslösung:</b>	
Aussehen:	klare, blaue Lösung
pH-Wert (in Leitungswasser):	ca. 7,6

## Zubehör / Dosierhilfen

	Art. Nr.
2-l-Flaschendosierer (20 ml/ 1 x kippen)	183401
5-l-Kanisterhahn	135501
30-l-Kanisterhahn	126101
5-l-Kanisterdosierer (20 ml/Hub)	117101
30-l-Kanisterdosierer (100 ml/ Hub)	182501
5-l-Kanisterschlüssel	135810
30-l-Kanisterschlüssel	135901
Messbecher 500 ml	136101
Umfülltrichter	117901

Für ausführliche Informationen zu unseren Dosiergeräten fordern Sie bitte die Gesamtübersicht Hygiene-Technik an.

## Anwendungskonzentrationen / Einwirkzeiten

Wirksamkeiten	1 Min.	15 Min.	30 Min.	60 Min.	4 Std.
<b>DGHM-Liste</b> Flächendesinfektion in Krankenhaus und Praxis		2 % (20 ml/l)	1 % (10 ml/l)	0,5 % (5 ml/l)	0,25 % (2,5 ml/l)
begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV und HCV)			0,5 % (5 ml/l)		
Rota-Viren	2 % (20 ml/l)	1 % (10 ml/l)	0,5 % (5 ml/l)		

\*) gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01/2004

## Anwendungshinweise

Gebrauchslösung in gewünschter Konzentration herstellen. Eine exakte Präparatedosierung wird durch S&M-Dosierhilfen unterstützt. Die Dosierung über zentrale und dezentrale Dosiergeräte ist möglich. Oberflächen von Medizinprodukten, bzw. Fußböden und andere wischbare Flächen feucht wischen. Auf vollständige Benetzung (z. B. 40 ml/m<sup>2</sup>) achten. Ausrüstung gut mit Wasser reinigen.

Aufgrund der guten Reinigungseigenschaften von Antifect® FF ist eine Abmischung mit Reinigungsverstärkern in der Regel nicht erforderlich.

Wegen des Gehaltes an kationaktiven Wirkstoffen kann die Abmischung mit Reinigern oder Wischpflegeprodukten Auswirkungen auf die mikrobiologische Präparateleistung haben und anwendungstechnische Probleme verursachen. Daher sollte eine Präparateabmischung nur nach vorheriger Absprache mit Schülke & Mayr erfolgen.

## Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

(gilt für das Konzentrat):

- Xn:** Gesundheitsschädlich  
**N:** Umweltgefährlich
- R20/21/22:** Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut
- R38:** Reizt die Haut  
**R41:** Gefahr ernster Augenschäden  
**R50:** Sehr giftig für Wasserorganismen  
**R68:** Irreversibler Schaden möglich
- S26:** Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
- S36/37/39:** Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe (z. B. aus Butylkautschuk) und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen
- S61:** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/ Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen

## Besondere Hinweise

**Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

Vertrieb durch:

[www.praximed.com](http://www.praximed.com)  
[info@praximed24.eu](mailto:info@praximed24.eu)  
 Fax 037754-2393



EMAS  
 GEPRÜFTES  
 UMWELTMANAGEMENT  
 REG.-NR. D-150-00003



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567 MP21) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gemäß Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. DE-S-150 00003).

Schülke & Mayr GmbH  
 22840 Norderstedt  
 Telefon 040 / 521 00-0  
 Telefax 040 / 521 00-318  
[www.schuelke-mayr.com](http://www.schuelke-mayr.com)  
[mail@schuelke-mayr.com](mailto:mail@schuelke-mayr.com)

Schülke & Mayr AG  
 Obere Zäune 12  
 CH-8001 Zürich  
 Telefon (01) 252 98 02  
 Telefax (01) 252 98 27  
[mail.ch@schuelke-mayr.com](mailto:mail.ch@schuelke-mayr.com)

Schülke & Mayr Ges.m.b.H  
 Zieglergasse 8  
 A-1070 Wien  
 Telefon (1) 523 25 01  
 Telefax (1) 523 90 35 79  
[office@schuelke-mayr.at](mailto:office@schuelke-mayr.at)