

ASEPTOCONT LÖSUNG

Antimikrobielle Reinigungslösung für Haut und Schleimhaut

Produktbeschreibung

ASEPTOCONT LÖSUNG ist eine gebrauchsfertige, antimikrobielle Reinigungslösung zur lokalen Anwendung auf der Haut und Schleimhaut. Reduziert unangenehme Körpergerüche, wirkt antimikrobiell gegen Bakterien sowie Pilze und stabilisiert die physiologische Hautflora.

Anwendungsbereiche

Zur unterstützenden Wundbehandlung, u.a. zur Dekubitusreinigung und -pflege, zur Behandlung der gereizten Haut bei Stoma-Patienten, zur unterstützenden Behandlung von Wunden, bzw. Haut-/Schleimhautübergängen. Zur Pflege von Kathetereintrittsstellen, zur Lösung verkrusteter Verbände und Wundbeläge sowie in allen Bereichen, in denen Keimarmut von Haut und Schleimhaut erforderlich ist. Auch zur Nachbehandlung von gepiercter Haut-/Schleimhaut geeignet. Verhindert wirkungsvoll Infektionen durch Piercings.

Dekontamination von Patienten und Personal bei Kontamination/Kolonisation mit MRSA.

Bugt unangenehme Körpergerüche vor, u.a. bei ausgeprägtem Fuß und Achselschweiß und zum Desodorieren von Strümpfen, Schuhen und Unterwäsche. Lindert schuppenbedingten Juckreiz auf der Haut.

Anwendung

Zur unterstützenden Behandlung infizierter Haut-/Schleimhautübergänge, die betroffene Region zunächst waschen und die Seife oder Waschlotion gründlich abspülen. Im Anschluß **ASEPTOCONT LÖSUNG** mittels getränkter Longuetten oder Kompressen auf den betroffenen Bereich mehrmals täglich bis zum Abklingen des Geruches bestreichen.

Zur unterstützenden Behandlung infizierter oder superinfizierter Wunden wird **ASEPTOCONT LÖSUNG** mehrmals täglich in Abhängigkeit vom Grad der organischen Zusatzbelastung (Blut oder Eiweiß) spülen, pinseln oder mit Kompressen belegen.

Zur vorbeugenden Deodorierung die betroffene Hautregion waschen, Seife oder Waschlotion mit Wasser gründlich abspülen und **ASEPTOCONT LÖSUNG** bei talgdrüsen- oder schweißdrüsenarmer Haut einmal täglich, bei talgdrüsen- oder schweißdrüsenreicher Haut ein- bis dreimal täglich aufgetragen. Die Anwendung sollte bis zum Abklingen des Geruchs fortgeführt werden.

Schuhe, Strümpfe, Nacht- und Unterwäsche können durch Besprühen oder Einlegen in die Gebrauchslösung wirkungsvoll deodoriert werden.

Inhaltsstoffe

Nach INCI: AQUA, POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE, PEG-75, SODIUM CHLORIDE, PHENOXYETHANOL, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE

In 100 g der gebrauchsfertigen Lösung sind enthalten:

Polyhexanid	200 mg	
Macrogolum 4000	15 mg	in isotonischer Lösung

Chemisch physikalische Daten

pH-Wert	ca. 6
Dichte	ca. 1,00 g/ccm

Gutachten

Dr. Rosowski, Veterinärmediziner, Melsungen:
ASEPTOCONT LÖSUNG, hautphysiologisches Waschdeodorans, eine Produktbewertung anhand von wissenschaftlichen Literaturdaten zum Hauptinhaltsstoff Polyhexanid vom 10.08.1997

Lieferformen

Einzelpackung	Verk.-Einheit	Art.-Nr.	PZN
100-ml-Pumpsprühflasche	30 x 100 ml	041-00010	
500-ml-Spenderflasche	20 x 500 ml	041-00050	0202146

Besondere Hinweise

- **ASEPTOCONT LÖSUNG ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden**
- Um Kontaminationen zu vermeiden, sollte die Flasche nach Gebrauch sofort wieder verschlossen werden. Der Inhalt einer angebrochenen Flasche ist innerhalb von 4 Wochen zu verbrauchen.
- **Vorsicht!** **ASEPTOCONT LÖSUNG** darf niemals mit Kosmetika oder Arzneimitteln eingesetzt werden, die inkompatibel sind mit kationischen Verbindungen oder Biguaniden.

Schreiber/kk/07/2006