

# DECONTAMAN LIQUID

## antimikrobielle Reinigungslösung für Haut und Schleimhaut

- ausgezeichnete Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- zur MRSA-/ORSA-/VRE-Dekontamination
- mit Polyhexanid

- ✓ zur MRSA-Dekontamination
- ✓ mit Polyhexanid



### PRÄPARATETYP

**DECONTAMAN LIQUID** ist eine gebrauchsfertige, antimikrobielle Reinigungslösung zur lokalen Anwendung auf der Haut und Schleimhaut. Mit hervorragender Haut- und Schleimhautverträglichkeit. **DECONTAMAN LIQUID** wirkt antimikrobiell gegen Bakterien inkl. MRSA, stabilisiert die physiologische Hautflora und reduziert unangenehme Körpergerüche. **DECONTAMAN LIQUID** ist bereits **nach 30 Sek. wirksam gegen MRSA** (Multi-resistenter Staphylococcus aureus).

Es wurde erfolgreich gegenüber 3 verschiedenen MRSA-Stämmen im quantitativen Suspensionsversuch getestet.

**DECONTAMAN LIQUID** wirkt unterstützend bei Wundbehandlungen, u. a. bei der Dekubitusreinigung und -pflege sowie bei gereizter Haut von **Stoma-Patienten**.

Die Anwendung des Produktes wirkt unterstützend bei der Behandlung von infizierten Wunden, bzw. Haut-/Schleimhautübergängen. Ebenfalls geeignet zur Dekontamination von Patienten und Personal bei Kontamination/Kolonisation mit MRSA, und zur antimikrobiellen Reinigung von gepiercter Haut-/Schleimhaut geeignet.

**DECONTAMAN LIQUID** beugt unangenehmen Körpergerüchen vor, u.a. bei ausgeprägtem Fuß- und Achselschweiß und eignet sich zum Desodorieren von Strümpfen, Schuhen und Unterwäsche.

**DECONTAMAN LIQUID** lindert schuppenbedingten Juckreiz auf der Haut.

### ANWENDUNG

Nach dem Waschen der betroffenen Hautregion mit Seife oder Waschlotion die Haut mit Wasser gründlich abspülen und **DECONTAMAN LIQUID** auftragen. Bei talgdrüsen-, bzw. schweißdrüsenarmer Haut **DECONTAMAN LIQUID** einmal täglich, bei talgdrüsen- bzw. schweißdrüsenreicher Haut ein- bis dreimal täglich bis zum Abklingen des Geruches auftragen.

Bei Anwendung an Haut-/Schleimhautübergängen nach dem Waschen der betroffenen Stelle mit Seife oder Waschlotion die Haut mit Wasser gründlich abspülen und **DECONTAMAN LIQUID** mittels getränkter Longuetten oder Kompressen auf den Bereich mehrmals täglich aufstreichen. Zur ergänzenden Desodorierung oberflächlich infizierter oder superinfizierter Wunden **DECONTAMAN LIQUID** mehrmals täglich in Abhängigkeit vom Grad der organischen Zusatzbelastung (Blut oder Eiweiß) spülen, pinseln oder mit Kompressen belegen.

Durch Einlegen in die Gebrauchslösung oder Zerstäuben der Gebrauchslösung ist darüber hinaus die wirkungsvolle Desodorierung von Nacht- und Unterwäsche sowie Strümpfen und Schuhen möglich.

**DECONTAMAN LIQUID** wird mit großer Sorgfalt hergestellt. Um eine Kontamination zu vermeiden, sollte die Flasche nach Gebrauch sofort wieder verschlossen werden. Der Inhalt der Flasche ist innerhalb von vier Wochen zu verbrauchen.

### WIRKUNGSSPEKTRUM

Einwirkzeiten:

<b>MRSA</b> (Multi-resistenter Staphylococcus aureus)	<b>konz.</b>	<b>30 Sek.</b>
<b>VRE</b> (Vancomycin-resistente Enterokokken)	<b>konz.</b>	<b>1 Min.</b>

### ZUSAMMENSETZUNG NACH INCI

Aqua, Polyaminopropyl Biguanide, PEG-75, Natrium Chloride, Phenoxyethanol, Kalium Chloride, Calcium Chloride

In 100 g gebrauchsfertiger Lösung sind enthalten:

Polyhexanid	200 mg
Macrogolum 4000	15 mg

in isotonischer Lösung.





# DECONTAMAN LIQUID

antimikrobielle Reinigungslösung für Haut und Schleimhaut

## CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

pH-Wert: 6,0 + / - 1,0  
Dichte (20°C): 1,006 +/- 0,003 g/ml

## LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
250 ml Flasche	30 x 250 ml	3017840	00-610-0025
500 ml Flasche	20 x 500 ml	3017946	00-610-005
1 L Flasche	10 x 1 L	3018029	00-610-010

## BESONDERE HINWEISE

DECONTAMAN LIQUID ist gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

Vorsicht: Nie mit Kosmetika oder Arzneimitteln einsetzen, bei denen eine Inkompatibilität mit kationischen Verbindungen oder Biguaniden besteht.

## GUTACHTEN

Dr. Rosowski, Veterinärmediziner, Melsungen:  
DECONTAMAN LIQUID, hautphysiologisches Waschdeodorant:  
Eine Produktbewertung anhand von wissenschaftlichen Literaturdaten zum Hauptinhaltsstoff Polyhexanid, vom 10.08.1997.

Prof. Dr. Wille, Hygieniker, Gießen:  
Gutachten zur MRSA- Wirksamkeit vom 18.06.2004.

## REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG

Entspricht der EU-Kosmetikrichtlinie.

Vertrieb durch:

[www.praximed.com](http://www.praximed.com)  
[info@praximed24.eu](mailto:info@praximed24.eu)  
Fax 037754-2393



DR. SCHUMACHER GMBH  
Postfach 11 62 D-34201 Melsungen  
Telefon +49/5664/9496-0

[WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM](http://WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM)