

DESCOSEPT

alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

- ✓ dermatologisch getestet
- ✓ formaldehydfrei
- ✓ phenolfrei

- formaldehydfreies Schnelldesinfektionsmittel mit angenehmem Duft
- schnell wirksam
- gute Hautverträglichkeit



CE 0482

PRÄPARATETYP

DESCOSEPT ist eine gebrauchsfertige Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol, Ethandial und QAV zur wirksamen und schnellen Desinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten, medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art.

DESCOSEPT hat einen angenehmen, frischen Duft und eine gute Hautverträglichkeit. Geeignet als Flächendesinfektionsmittel in allen Bereichen, wo eine schnelle Desinfektion gebraucht wird.

- ärztliche und zahnärztliche Praxen (z.B. Behandlungsstühle)
- Schnelldesinfektion von OP-Inventar und Operationstischen zwischen den Operationen
- Bettgestelle, Matratzen, Decken und Kissen
- Transportmittel wie Krankentransportfahrzeuge, Notarztwagen, Müllentsorgungsfahrzeuge und Transportkörbe
- allgemeines Mobiliar wie Untersuchungsliegen, Verbandswagen, Badewannen und Toilettensitze
- Bekleidung wie Kittel, OP-Schuhe, Gummischürzen und Wäsche

DESCOSEPT entspricht den gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit zur Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen (TRGS 525/540).

ANWENDUNGSBEREICHE

Gem. MPG: Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten.

Gem. Biozidrichtlinie: Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet.

ANWENDUNG

Flächen und Gegenstände mit **DESCOSEPT** aus mindestens 30 cm Abstand bis zur vollen Benetzung besprühen, nach Ablauf der Einwirkzeit mit Einmaltuch nachwischen. Zur Vermeidung von starker Raumluftbelastung durch Alkohol **DESCOSEPT** in ein Einmaltuch sprühen und die Flächen bei entsprechender Benetzung abwischen. **DESCOSEPT** hat praktisch keine Belagsbildung zur Folge.

WIRKUNGSSPEKTRUM

DESCOSEPT wirkt:

- bakterizid inkl. MRSA
- tuberkulozid
- fungizid (*C. albicans*), levurozid
- virusinaktivierend inkl. HBV/HIV/BVDV/HCV/Vaccinia-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)

EINWIRKZEITEN

bakterizid inkl. MRSA, fungizid (*C. albicans*)/levurozid
gem. DGHM/VAH konz. 1 Min.*
(*gelistet in der 5-Min.-Spalte der VAH/DGHM)
Tuberkulose-Bakterien (*M. terrae*) konz. 1 Min.

wirksam gegen alle behüllten Viren wie Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV
(begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung) konz. 30 Sek.





DESCOSEPT

alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g Lösung sind enthalten:

- 38,9 g Ethanol
- 0,1 g Ethandial
- 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

- Aussehen:** klare, farblose Lösung
- pH-Wert:** 5,75 +/- 0,75
- Dichte (20,0 °C):** 0,94 +/- 0,01 g/ml
- Flammpunkt:** 27 °C

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
250 ml Flasche	30 x 250 ml	-	00-301-0025
1 L Flasche	10 x 1 L	4606395	00-301-010
5 L Kanister	3 x 5 L	4606403	00-301-050
10 L Kanister	1 x 10 L	4606426	00-301-100

DOSIERHILFEN

250-ml-Sprühflasche, Sprühkopf für 1 Liter Flasche, Kanisterumfüllhahn, Kanisterschlüssel.

BESONDERE HINWEISE

Entzündlich. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
 Behälter dicht geschlossen halten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
 Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen.

Ausbringung max. 50 ml pro m².
 Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml pro m² Raumgrundfläche betragen.
 Alkoholempfindliche Oberflächen und Acrylglas-Kunststoffe nicht besprühen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

GUTACHTEN

Dr. Pitten, Hygieniker, Gießen:
 Gutachten zur Flächendesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien, 26.05.2008.

Prof. Dr. Schubert, Hygieniker, Frankfurt:
 Gutachten zur Flächendesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien, 01.08.2008.

Dr. Steinmann, Virologe, Bremen:
 Gutachten zur Vakzinia-Wirksamkeit vom 12.12.2005.
 Gutachten zur BVDV-Wirksamkeit (HCV) vom 24.02.2006.

Dr. Pitten, Hygieniker, Gießen:
 Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit vom 11.02.03.

Dr. Brill, Mikrobiologe, Hamburg:
 Gutachten zur desinfizierenden Wirksamkeit in Kombination mit dem Vliestuchsystem **DESCO WIPES DT**, 28.05.2008.
 Gutachten zur mikrobiologischen Stabilität in Kombination mit dem Vliestuchsystem **DESCO WIPES DT**, 28.05.2008.

Prof. Dr. Tronnier, Dermatologe, Witten:
 Dermatologisches Gutachten zur Hautverträglichkeit vom 16.01.96.

REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der DGHM/VAH.
 Registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: baua Reg.-Nr.: N - 20343.
 Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

