

DESCOCEPT AF

alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

- aldehydfreies Schnelldesinfektionsmittel mit frischem Duft
- umfassende Virenwirksamkeit inkl. Noro-Viren
- gute Hautverträglichkeit

als Schaum
applizierbar



CE 0482



- ✓ dermatologisch getestet
- ✓ aldehydfrei
- ✓ phenolfrei

PRÄPARATETYP

DESCOCEPT AF ist eine gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol und quartären Ammoniumverbindungen.

DESCOCEPT AF hat einen angenehmen, **frischen Duft** und eine **gute Hautverträglichkeit**. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen nach Anwendung von **DESCOCEPT AF** nahezu ausgeschlossen.

Umfangreiche Wirksamkeit gegenüber Viren- auch wirksam gegen Noro-Viren.

Als Flächendesinfektionsmittel in allen Bereichen, wo eine schnelle Desinfektion gebraucht wird. Geeignet für:

- ärztliche und zahnärztliche Praxen (z.B. Behandlungstühle, auch Hand- und Winkelstücke)
- Augenärztliche Praxen und Optiker zur Vorbeugung von viralen Infektionen
- Schnelldesinfektion von OP-Inventar und Operationstischen zwischen den Operationen
- Bettgestelle, Matratzen, Decken und Kissen
- Transportmittel wie Krankentransportfahrzeuge, Notarztwagen, Müllentsorgungsfahrzeuge und Transportkörbe
- allgemeines Mobiliar wie Untersuchungsliegen, Verbandswagen, Badewannen und Toilettensitze
- Bekleidung wie Kittel, OP-Schuhe, Gummischürzen und Wäsche

DESCOCEPT AF erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit bezüglich der Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen gem. TRGS 525/540.

ANWENDUNGSBEREICHE

Gem. MPG: Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten.

Gem. Biozidrichtlinie: Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet.

ANWENDUNG

Flächen und Gegenstände mit **DESCOCEPT AF** aus mindestens 30 cm Abstand bis zur vollen Benetzung besprühen, nach Ablauf der Einwirkzeit mit Einmaltuch nachwischen.

Zur Vermeidung von starker Raumluftbelastung durch Alkohol **DESCOCEPT AF** in ein Einmaltuch sprühen und die Flächen bei entsprechender Benetzung abwischen.

DESCOCEPT AF hat praktisch keine Belagsbildung zur Folge.

WIRKUNGSSPEKTRUM

DESCOCEPT AF wirkt:

- bakterizid inkl. MRSA
- tuberkulozid
- fungizid, levurozid
- virusinaktivierend inkl. HBV/HIV, HCV, BVDV, Rota-, Adeno-, Vaccinia-Viren, Noro-Viren

EINWIRKZEIT

bakterizid inkl. MRSA, fungizid (<i>C. albicans</i>)/ levurozid gem. DGHM/ÖGHMP/VAH	konz. 1 Min.*
(*gelistet in der 5-Min.-Spalte der DGHM/VAH)	
Tuberkulose-Bakterien (<i>M. terrae</i>)	konz. 1 Min.
Aspergillus niger	konz. 30 Min.

wirksam gegen alle behüllten Viren wie Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV

(begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)	konz. 30 Sek.
Rota-/Adeno-Viren	konz. 1 Min.
Noro-Viren (FCV)	konz. 15 Min.



DR. SCHUMACHER GMBH
Postfach 11 62 D-34201 Melsungen
Telefon +49/5664/9496-0

WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM



DESCOSEPT AF

alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g Lösung sind als wirksame Bestandteile enthalten:

42,0 g Ethanol

0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Aussehen: klare, farblose Lösung

pH-Wert: 7,0 +/- 1,0

Flammpunkt: 25 °C

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
500 ml Flasche	20 x 500 ml	0792277	00-311-005
1 L Flasche	10 x 1 L	0792283	00-311-010
2 L Beutel	6 x 2 L	1834397	00-311-020
5 L Kanister	3 x 5 L	0792308	00-311-050
10 L Kanister	1 x 10 L	0792314	00-311-100

DOSIERHILFEN

Sprühkopf für 500-ml und 1-Liter-Flasche, Kanisterumfüllhahn, Kanisterschlüssel.

BESONDERE HINWEISE

Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten! Nicht rauchen. Von Zündquellen fernhalten! Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Ausbringung max. 50 ml pro m². Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml pro m² Raumgrundfläche betragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

GUTACHTEN

Dr. Pitten, Hygieniker, Gießen:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien, 11.04.2008.

Prof.Dr. Rotter, Dip.Bact.(London), Wien:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien, 28.02.2006.

Dr. Steinmann, Virologe, Bremen:

Gutachten zur Wirksamkeit gegenüber: Adeno-Viren, 03.05.2001; FCV (Noro Viren), 04.04.05; Vakzinia, 12.12.2005; BVDV, 12.12.2005.

Prof. Dr. Werner, Hygieniker, Schwerin:

Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit, 12.04.1999.

Dermatest, Münster:

Fachärztliches, dermatologisches Gutachten (Epikutantest), 26.05.2000.

Konrad Hornschuch AG:

Desinfektionsmittelempfehlung bzgl. **DESCOSEPT AF** zur Anwendung an skai- Polstermaterialien, 09.08.2005.

Dr. Brill, Hygieniker, Hamburg:

Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **DESCOSEPT AF** im **DESCO WIPES SYSTEM** vom 08.11.2006; Desinfizierende Wirkung des Vliesstoffes **DESCO WIPES DT** in Kombination mit **DESCOSEPT AF** vom 21.03.2007.

Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **DESCOSEPT AF** im **ECO WIPES SYSTEM**, 13.06.2007.

REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der DGHM/VAH.

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der ÖGHMP.

Registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz:

baua Reg.-Nr.: N - 20338.

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

