

# DESCOCEPT AF LEMON

## alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel


- aldehydfreies Schnelldesinfektionsmittel
- mit frischem Limonenduft
- Duftvariante von Descosept AF

als Schaum  
applizierbar



CE 0482

- ✓ dermatologisch getestet
- ✓ aldehydfrei
- ✓ phenolfrei

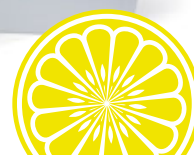

### PRÄPARATETYP

**DESCOCEPT AF LEMON** ist eine gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol und quartären Ammoniumverbindungen.

**DESCOCEPT AF LEMON** hat einen angenehmen, frischen Duft und eine gute Hautverträglichkeit. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen nach Anwendung von **DESCOCEPT AF LEMON** nahezu ausgeschlossen.

Umfangreiche Wirksamkeit gegenüber Viren, auch wirksam gegen Noro-/Norwalk-like Viren.

Als Flächendesinfektionsmittel in allen Bereichen, wo eine schnelle Desinfektion gebraucht wird. Geeignet für:

- ärztliche und zahnärztliche Praxen, wo eine schnelle Desinfektion erforderlich ist (z.B. Behandlungsstühle, auch Hand- und Winkelstücke)
- Augenärztliche Praxen und Optiker zur Vorbeugung von viralen Infektionen
- Schnelldesinfektion von OP-Inventar und Operationstischen zwischen den Operationen
- Bettgestelle, Matratzen, Decken und Kissen
- Transportmittel wie Krankentransportfahrzeuge, Notarztwagen, Müllentsorgungsfahrzeuge und Transportkörbe
- allgemeines Mobiliar wie Untersuchungsliegen, Verbandswagen, Badewannen und Toilettensitze
- Bekleidung wie Kittel, OP-Schuhe, Gummischürzen und Wäsche

**DESCOCEPT AF LEMON** erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/540.

### ANWENDUNGSBEREICHE

**Gem. MPG:** Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten.

**Gem. Biozidrichtlinie:** Zur Schnelldesinfektion und -Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet.

### ANWENDUNG

Flächen und Gegenstände mit **DESCOCEPT AF LEMON** aus mindestens 30 cm Abstand bis zur vollen Benetzung besprühen, nach Ablauf der Einwirkzeit mit Einmaltuch nachwischen.

Zur Vermeidung von starker Raumluftbelastung durch Alkohol **DESCOCEPT AF LEMON** in ein Einmaltuch sprühen und die Flächen bei entsprechender Benetzung abwischen.

**DESCOCEPT AF LEMON** hat praktisch keine Belagsbildung zur Folge.

### WIRKUNGSSPEKTRUM


- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- fungizid, levurozid
- virusinaktivierend inkl. HBV/HIV, HCV, BVDV, Rota-, Adeno-, Vaccinia-Viren, Noro-Viren

### EINWIRKZEIT

bakterizid inkl. MRSA, fungizid (C. albicans)/ levurozid gem. DGHM/VAH	konz. 1 Min.*
(*gelistet in der 5-Min.-Spalte der DGHM/VAH)	
Tuberkulose-Bakterien (M. terrae)	konz. 1 Min.
Aspergillus niger	konz. 30 Min.
<b>wirksam gegen alle behüllte Viren wie Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV</b>	
(begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)	konz. 30 Sek.
Rota-/Adeno-Viren	konz. 1 Min.
Noro-Viren (FCV)	konz. 15 Min.



# **DESCOSEPT AF LEMON** alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

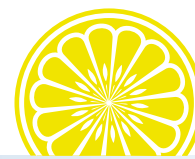

## ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g Lösung sind als wirksame Bestandteile enthalten:

42,0 g Ethanol  
0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

## CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

**Aussehen:** klare, farblose Lösung  
**pH-Wert:** 7,0 +/- 1,0  
**Flammpunkt:** 25,0 °C

## LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
1 L Flasche	10 x 1 L	1899267	00-311L-010
5 L Kanister	3 x 5 L	1899296	00-311L-050
10 L Kanister	1 x 10 L	1899391	00-311L-100

## DOSIERHILFEN

Sprühkopf für 1-Liter-Flasche, Kanisterumfüllhahn, Kanisterschlüssel.

## BESONDERE HINWEISE

Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten! Nicht rauchen. Von Zündquellen fernhalten! Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Ausbringung max. 50 ml pro m<sup>2</sup>. Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml pro m<sup>2</sup> Raumgrundfläche betragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## GUTACHTEN

**Dr. Pitten**, Hygieniker, Gießen:  
Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien, 11.04.2008.

**Prof. Dr. Rotter**, Dip.Bact.(London), Wien:  
Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien, 28.02.2006.

**Dr. Steinmann**, Virologe, Bremen:  
Gutachten zur Wirksamkeit gegenüber: Adeno-Viren, 03.05.2001; FCV (Noro Viren), 04.04.05; Vakzinia, 12.12.2005; BVDV, 12.12.2005.

**Prof. Dr. Werner**, Hygieniker, Schwerin:  
Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit, 12.04.1999.

**Dermatest**, Münster:  
Fachärztliches, dermatologisches Gutachten (Epikutantest), 26.05.2000.

**Konrad Hornschuch AG:**  
Desinfektionsmittelempfehlung bzgl. **DESCOSEPT AF** zur Anwendung an skai- Polstermaterialien, 09.08.2005.

**Dr. Brill**, Hygieniker, Hamburg:  
Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **DESCOSEPT AF** im **DESCO WIPES SYSTEM** vom 08.11.2006; Desinfizierende Wirkung des Vliesstoffes **DESCO WIPES DT** in Kombination mit **DESCOSEPT AF** vom 21.03.2007.  
Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **DESCOSEPT AF** im **ECO WIPES SYSTEM**, 13.06.2007.

## REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG

**DESCOSEPT AF** ist aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der DGHM/VAH.  
**DESCOSEPT AF** ist aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der ÖGHMP.  
Registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: baua Reg.-Nr.: N - 20338.  
Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

