

DESCOCEPT PUR

alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

- rückstandsfrei
- besonders geeignet für Allergiker, da aldehydfrei
- parfümfrei

- ✓ aldehydfrei
- ✓ parfümfrei
- ✓ rückstandsfrei



getestet und empfohlen von:



CE 0482

PRÄPARATETYP

Gebrauchsfertige, **aldehydfreie Schnelldesinfektion** auf der Basis von Ethanol zur wirksamen und schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet.

DESCOCEPT PUR ist parfümfrei und rückstandsfrei.

Daher besonders für die Schnelldesinfektion in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich geeignet.

Gute Hautverträglichkeit, deshalb besonders für Allergiker und hautempfindliche Personen zu empfehlen, da parfüm- und aldehydfrei.

Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen von Oberflächen nach Anwendung von **DESCOCEPT PUR** nahezu ausgeschlossen.

Nicht anwenden bei alkoholempfindlichen Oberflächen (Acrylglas)!

DESCOCEPT PUR entspricht den gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit zur Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen (TRGS 525/540).

ANWENDUNGSBEREICHE

Gem. MPG: Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Medizinprodukten.

Gem Biozidrichtlinie: Zur Desinfektion und -Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet.

ANWENDUNG

Flächen und Gegenstände mit **DESCOCEPT PUR** aus mindestens 30 cm Abstand bis zur vollen Benetzung besprühen, nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit Einmaltuch nachwischen. Zur Vermeidung von starker Raumluftbelastung durch Alkohol **DESCOCEPT PUR** in ein Einmaltuch sprühen und die Flächen bei entsprechender Benetzung abwischen. Die Anwendung von **DESCOCEPT PUR** hat keine Belagsbildung zur Folge.

WIRKUNGSSPEKTRUM

DESCOCEPT PUR wirkt:

- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- fungizid (C. albicans) / levurozid
- virusinaktivierend (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Noro-Viren)

EINWIRKZEIT

bakterizid inkl. MRSA, fungizid (C. albicans) / levurozid gem. DGHM/ÖGHMP/VAH-Richtlinien konz. 1 Min.*
(*gelistet in der 5-Min.-Spalte der DGHM/VAH)
Tuberkulose-Bakterien (M. terrae) konz. 1 Min.

bakterizid inkl. MRSA, fungizid gem. DVG-Richtl. für den Lebensmittelbereich: konz. 5 Min.

Behüllte Viren wie Vakzinia, BVDV, HBV, HIV, HCV (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)
konz. 30 Sek.
Noro- Viren (FCV) konz. 30 Min.





DESCOCEPT PUR

alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g Lösung sind enthalten als wirksamer Bestandteil:
45,0 g Ethanol

Parfümfrei, keine auf der Fläche verbleibenden Inhaltsstoffe.

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Aussehen des Konzentrates: klare, farblose Lösung
pH-Wert: ca. 6,5
Dichte (20,0 °C): ca. 0,92

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
1 L Flasche	10 x 1 L	1898718	00-323-010
5 L Kanister	3 x 5 L	1834380	00-323-050

DOSIERHILFEN

Sprühkopf für 1-Liter-Flasche.

BESONDERE HINWEISE

Entzündlich. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen. Behälter dicht geschlossen halten! Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Ausbringung max. 50 ml/m². Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml/m² Raumgrundfläche betragen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

GUTACHTEN

Prof. Dr. Schubert, Hygieniker, Frankfurt:
Gutachten zur Flächendesinfektion gem. neuen DGHM/VAH-Richtlinien, 01.12.2005.

Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit, 12.07.2006.

Dr. Steinmann, Virologe, Bremen:

Gutachten zur Vaccinia-Wirksamkeit vom 12.12.2005.

Gutachten zur BVDV-Wirksamkeit vom 10.08.2006.

Gutachten zur Noro-Wirksamkeit vom 08.07.2007.

Dr.rer.nat. Holger Brill, Hamburg:

Gutachten zur Wirksamkeit für den Einsatz im Lebensmittelbereich bei 20 °C gem. DVG-Richtlinien, 24.01.2005.

Univ.-Prof. Dr. R. Böhm, Stuttgart:

Aufnahme in die Desinfektionsmittelliste der DVG für den Lebensmittelbereich, 21.10.2005.

Dr. F. Tilkes, Gießen:

Gutachten zur Wirksamkeit für den Einsatz im Lebensmittelbereich bei 20 °C gem. DVG-Richtlinien vom 12.07.2005.

O.Univ.-Prof.Dr.M. Rotter, Wien:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. neuen DGHM/VAH-Richtlinien, vom 09.01.2006.

Dr. Brill, Hygieniker, Hamburg:

Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **DESCOCEPT PUR** im **DESCO WIPES SYSTEM** vom 08.11.2006.

Desinfizierende Wirkung des Vliesstoffes **DESCO WIPES DT** in Kombination mit **DESCOCEPT PUR**, 21.03.2007.

Chemical Check GmbH, Steinheim:

Bewertung von **DESCOCEPT PUR** zum Einsatz in der Lebensmittelhygiene im Rahmen des HACCP-Konzeptes, vom 02.02.2007.

Derma Consult GmbH, Alfter:

Patch-Test am Menschen (Kosmetische Studie), 02.11.2007.

Fa. Hettich Zentrifugen:

Materialverträglichkeitstests an Zentrifugen vom 05.10.2007.

REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG

Zertifiziert gem. DGHM/VAH-Richtlinien.

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der ÖGHMP.

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste für den Lebensmittelbereich der DVG (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft).

Registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: baua Reg.-Nr.: N - 20109 und N - 30100.

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.



DR. SCHUMACHER GMBH
Postfach 11 62 D-34201 Melsungen
Telefon +49/5664/9496-0

WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM