

Gebrauchsfertige Sprühdeseinfektion
für alle alkoholbeständigen Oberflächen
und Gegenstände,
aldehydfrei



Desinfektion

Medizid® Rapid

DGHM
gelistet

VAH
zertifiziert



CE 0124

Rösner-Mautby
Meditrade GmbH
Kiefersfelden
GERMANY

WIRKUNGSSPREKTRUM:

MEDIZID® RAPID wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae), begrenzt viruzid und ist damit umfassend wirksam gegen alle behüllten Viren (BVDV/Vaccinia inkl. HBV, HIV, HCV). Darüber hinaus wirkt MEDIZID® RAPID gegen **Rota- und Noroviren, sowie MRSA.**

REF	Artikel	Karton	Europalette
01002D	250 ml Flasche	12 x 250 ml	130 Karton
00976D	1 l Flasche	12 x 1 l	32 Karton
00977D	5 l Kanister	2 x 5 l	52 Karton

Zubehör	REF	Artikel
	00930	Dosierpumpe 1 l
	00995	Sprühkopf 1 l
	00931	Kanisterdosierpumpe 5 l
	00932	Kanisterschlüssel 5 l
	00996	Kanisterhahn 2 l + 5 l

06/2011

Gebrauchsfertige Sprühdesinfektion
für alle alkoholbeständigen Oberflächen
und Gegenstände,
aldehydfrei

Medizid® Rapid



ZUSAMMENSETZUNG:

In 100 g sind enthalten:

30 g 1-Propanol, 15 g 2-Propanol, 10 g Ethanol,
0,05 g Didecylmethylammoniumpropionat,
0,02 g Alkylaminguanidindiacetat.

Weitere Bestandteile: Duftstoffe, Nichtionische
Tenside.

PRÄPARATETYP/ANWENDUNGSBEREICHE:

MEDIZID® RAPID ist ein gebrauchsfertiges, sehr
schnell wirkendes Präparat zur Reinigung und
Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen
medizinischer Geräte und Gegenstände im
patientennahen Umfeld in Kliniken, Praxen,
Ambulanzen und Pflegebereichen. Ebenso
geeignet für Laboratorien, Industrie, Küchen- und
Lebensmittelbereiche. Ideal für Bereiche, in denen
zwischen Behandlungen und Eingriffen sehr kurze
Einwirkzeiten erforderlich sind. MEDIZID® RAPID
ist ein alkoholisches Produkt. Vor Gebrauch stets
Produktinformation lesen. MEDIZID® RAPID kann
als Dual-Use Produkt eingesetzt werden (Biozid
und Medizinprodukt der Klasse II a).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- gebrauchsfertig
- aldehydfrei
- sehr schnell, bereits in 30 Sek., umfassend
wirksam
- rückstandsfrei
- gute Materialverträglichkeit

VORSICHTSMAßNAHMEN/WARNHINWEISE:

Beim Umgang mit dem Konzentrat gemäß
Gefahrstoffverordnung: Entzündlich. Nicht in
die Hände von Kindern gelangen lassen. Von
Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei
Berührung mit den Augen gründlich abspülen
und Arzt konsultieren. Nur in gut belüfteten
Bereichen verwenden.

Beim Umgang mit dem Produkt Gummihandschuhe
und Schutzbrille tragen. Berührung mit der Haut
vermeiden. Bei der Arbeit nicht rauchen. Von
Zündquellen fernhalten. Nicht über 50°C lagern.

Hinweis:

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z.B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit, sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.

WIRKSAMKEIT:

Bakterizid, fungizid, tuberkulozid

DGHM / VAH-Liste: Konz. / 5 Min.

M.-terrae: Konz. / 30 Sek.

MRSA: Konz. / 5 Min.

Behüllte Viren

BVDV/Vaccinia: Konz. / 30 Sek.

HBV / HIV / HCV: Konz. / 30 Sek.

Unbehüllte Viren

Rotavirus: Konz. / 30 Sek.

Norovirus: Konz. / 5 Min.

Adeno/ Polio: Konz. / 15 Min.

ANWENDUNG:

MEDIZID® RAPID ist gebrauchsfertig. Die zu
desinfizierenden Flächen und Gegenstände sind
bis zur vollständigen Benetzung einzusprühen.
Einwirkzeit: 30 Sek., Fläche ggf. mit trockenem,
sauberem Tuch trockenwischen.

BEGUTACHTUNG:

Standardmethoden der DGHM zur Prüfung
chemischer Desinfektionsverfahren:

Prof. Dr. med. Ralph Schubert, Juli 2005

HygCen, Prof. Dr. med. H.-P. Werner,
November 2008

Bestimmung der bakteriziden Wirkung im
quantitativen Suspensionstest:

HygCen, Prof. Dr. med. H.-P. Werner,
Februar 2009

WEITERE ANGABEN:

Packung nur völlig restentleert der
Wertstoffsammlung zuführen. Größere
Produktreste in der Originalverpackung der
Problemabfallentsorgung zuführen.