

Melsitt®

gefärbt

Flächendesinfektionsmittelkonzentrat mit hoher Reinigungskraft

bakterizid, fungizid, tuberkulozid, wirksam gegen lipophile Viren inkl. HBV, HIV sowie Rotaviren

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:

Formaldehyd 4,2 g, Glutaral 3,0 g, Didecyldimethylammoniumchlorid 6,0 g, nichtionische Tenside, Komplexbildner, Duftstoffe, Stabilisator, Korrosionsinhibitoren, Farbstoff.

Anwendungsgebiete

Flächendesinfektionsmittel zur kombinierten Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, wie z.B. OP-Ausstattung, Krankenhausbetten und Behandlungsstühle.

Auch geeignet für andere abwaschbare Flächen, für Fussböden (inkl. Terrazzo) sowie zur Wäschedesinfektion. Einsetzbar in Steckbeckenspülanlagen.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

1. Eimer mit vorgesehener Wassermenge füllen (nicht über 25°C)
2. Melsitt® gefärbt mit geeignetem Dosiersystem (z.B. Messbecher) abmessen und gut im Wasser vermischen

Konzentrationen und Einwirkzeiten (EZ)

Einsatzgebiete	Konz.	EZ	Menge*
Flächendesinfektion nach DGHM-Richtlinien			
– zur Hospitalismusprophylaxe im Krankenhaus u. in der allgem. Praxis – von rohem Holz (Pilze)	2,0%	15 min	160 ml
	1,0%	30 min	80 ml
	0,5%	1 h	40 ml
	2,5%	1 h	200 ml
	1,5%	4 h	120 ml
Desinfektion gemäss § 10 c BSeuchG			
– Scheuerdesinfektion	10,0%	4 h	800 ml
– Wäschedesinfektion	4,0%	12 h	320 ml
Flächendesinfektion bei			
TB	3,0%	1 h	240 ml
	1,5%	6 h	120 ml
HBV/HIV – geringe Eiweissbelastung	0,5%	1 h	40 ml
	1,0%	2 h	80 ml
Rotaviren	2,0%	30 min	160 ml

* Mengenangaben beziehen sich auf 8 Liter gebrauchsfertige Lösung.

Hinweise

Zu desinfizierende elektrische Geräte müssen vorher spannungslos gemacht werden. Ist dies nicht möglich, ist sicherzustellen, dass während der Desinfektion keine Schaltvorgänge ablaufen. Heisse Flächen müssen vor der Desinfektion abgekühlt sein.

Die Berufsgenossenschaft schreibt beim Umgang mit nicht für die Haut bestimmten Desinfektionsmitteln das Tragen von Schutzhandschuhen vor.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Packungsgrössen

1000 ml, 5 Liter und 25 Liter

UBA-Nr.: 10390001



REF = Artikelnummer



= verwendbar bis



= Chargenbezeichnung



= vor Hitze schützen

10/99-87034

B | BRAUN

B. Braun Melsungen AG
D-34209 Melsungen
Tel. (0049) 5661-710

Hersteller:
B. Braun Medical AG
CH-6021 Emmenbrücke
Tel. (0041) 41 - 269 01 11