



WIE WIRKT PSORIAMED® GENAU?

Die zelluläre Therapie wirkt spezifisch auf funktional gestörte Zellen. Schon seit längerem ist bekannt, dass der Botenstoff cAMP (cyclisches Adenosin-Monophosphat) in psoriatischen Hautzellen gegenüber normalen Zellen erheblich erniedrigt ist. DERTINGER und Mitar-

beiter konnten in zellbiologischen Untersuchungen zeigen, dass der zelluläre Botenstoff durch mittelfrequente Reizströme gezielt stimuliert werden kann.

Bestimmte „Frequenzfenster“ erwiesen sich bei den klinischen Tests als optimal wirksam. Es wurde nicht nur eine Erhöhung des cAMP, sondern auch die gesteigerte Bildung des anti-entzündlichen Interleukin-10 festgestellt. Die hohe antipsoriatische Effektivität der Therapie beruht sowohl auf der Normalisierung der Zellteilung der Keratinocyten, als auch auf einer anti-entzündlichen und anti-ödematösen Wirkung.



THERAPIE-BEISPIEL AUS DER PRAXIS

Befund: Psoriasis palmaris seit ca. 2 Jahren


Behandlung: Absetzung der vorherigen Therapie 14 Tage vor Behandlung mit PSORIAMED®, 3 Monate tägliche Anwendung, morgens und abends je 5 Min.



Behandlungsbeginn



20 Tage später

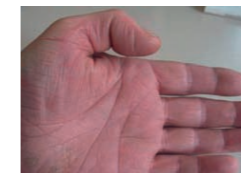

Behandlungsende

Das Therapiekonzept PSORIAMED® kann auch gemietet werden!

PSORIAMED®-Infotelefon
+49 (0)9126 / 25 87-0

PHYSIOMED®

www.schuppenflechte-lindern.de

02/2009. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Schuppenflechte lindern

PSORIAMED®:

effektive Therapie der Psoriasis durch Reizstrom

- » schonend
- » nebenwirkungsfrei
- » klinisch erprobt



» Sie haben Schuppenflechte? Die Behandlung mit PSORIAMED® erwies sich in Studien in 90% aller Fälle als effektiv im Sinne eines kompletten Rückgangs der Krankheitserscheinungen oder einer deutlichen Besserung!



THERAPIEKONZEPT PSORIAMED®

PSORIAMED® ist ein sehr einfach anwendbares Therapiekonzept. Vorgegebene Programme ermöglichen eine zeitsparende Therapie. Nach Auswahl der betroffenen Region regeln Sie lediglich die Intensität auf und die Behandlung beginnt. Die Therapie sollte täglich morgens und abends jeweils 5 Minuten angewendet werden.

Für verschiedene, am häufigsten betroffene Arealen stehen spezielle Wasserbäder und unterschiedliche Elektrodenarten zur Verfügung. Neben diesen Spezialbehandlungen für Hände, Füße, Ellbogen, Arme und Kopf lässt sich die Therapie durch Elektroden, die mit Klettbindern flexibel angebracht werden können, auch an allen anderen Körperstellen durchführen.



Vertrieb durch:

www.praximed.com
info@praximed24.eu
Fax 037754-2393



PSORIAMED® WIRKT!

Die effektive Therapie der Schuppenflechte (Psoriasis) durch die Anwendung von Reizstrom.



WARUM REIZSTROM?

Elektrische Ströme gelten als bewährte, effiziente Therapieformen und erfreuen sich aktuell vor allem durch ihre Freiheit von Nebenwirkungen an erneuter Popularität. Nicht selten werden sie von chronischen oder sogenannten „austherapierten“ Patienten als interessante Behandlungsalternative wieder entdeckt. Auch bei der Behandlung der Psoriasis zeigen Reizströme sehr gute, schnell sichtbare Behandlungserfolge. Die Therapie basiert auf einem Behandlungskonzept, das am Forschungszentrum Karlsruhe

unter der Leitung von Prof. Dr. Hermann DERTINGER entwickelt und umfassend wissenschaftlich begründet wurde. In klinischen Studien hat sie sich, vor allem auch in bisher therapieresistenten Fällen, als hoch wirksam erwiesen: etwa 90% der Patienten sprechen auf die schonende und nebenwirkungsfreie Therapie an.