

THERMOTON® CLEAR

*Klarspüler mit
neutralisierenden Eigenschaften*

- auf der Basis von Zitronensäure
- gewährleistet eine fleckenfreie Trocknung des Spülguts
- mit Korrosionsinhibitoren



CE



PRÄPARATETYP

THERMOTON® CLEAR ist ein flüssiger Klar- und Glanzspüler mit neutralisierender Wirkung.

Spezielle schaumfreie Netzmittel gewährleisten eine fleckenfreie Trocknung sämtlicher Materialien.

Integrierte Korrosionsinhibitoren erzielen eine sehr gute Materialverträglichkeit.

THERMOTON® CLEAR kann auch als Neutralisationsmittel nach der Anwendung alkalischer Reiniger eingesetzt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

THERMOTON® CLEAR wird zum Nach- bzw. Klarspülen nach der Reinigung und Desinfektion thermolabiler und thermostabiler Instrumente und Materialien nach Vorschrift der Automatenhersteller in den Desinfektions- und Reinigungsautomaten gegeben.

THERMOTON® CLEAR kann in höherer Anwendungskonzentration auch als Neutralisationsmittel nach der Anwendung alkalischer Reiniger eingesetzt werden.

ANWENDUNG

Materialien entsprechend den Empfehlungen (z.B. Hygieneplan) in die Maschine einlegen. Sämtliche zu reinigende, bzw. zu desinfizierende Oberflächen und Hohlräume müssen für die Maschinendesinfektion zugänglich sein. THERMOTON® CLEAR zum Nachspülen entsprechend den Vorschriften der Automatenhersteller einfüllen.

Hinweis (bei Programmeinstellung beachten):
Zudosierung erst ab 35 °C.

DOSIERUNG

Als Klarspüler: 0,1 - 0,5 ml/L
Als Neutralisationsmittel: 1 - 3 ml/L

ZUSAMMENSETZUNG

Zitronensäure, Alkohol, Tenside, Korrosionsinhibitoren.

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Aussehen des Konzentrates: klare, farblose Lösung
pH-Wert 0,5 %ige Lösung: 3,5
pH-Wert , Konzentrat: ca. 2
Dichte (20 °C): ca. 1,05 g/ml

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
2 L Flasche	6 x 2 L	-	00-116-020
5 L Kanister	3 x 5 L	-	00-116-050
30 L Kanister	1 x 30 L	-	00-116-300
200 kg Fassware	1 x 200 kg	-	-

DOSIERHILFEN

Kanisterumfüllhahn, Dosierpumpen für Kanister.

BESONDERE HINWEISE

Berührung mit den Augen vermeiden.
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

