

# **THERMOTON® N** neutralisierendes Nachspülmittel

- auf der Basis von Phosphorsäure
- reduziert Kalkablagerungen erheblich
- mit Korrosionsinhibitoren



CE

## PRÄPARATETYP

**THERMOTON® N** ist ein flüssiges, saures Neutralisationsmittel für den Einsatz in Spezialspülmaschinen. Es enthält keine Tenside. **THERMOTON® N** wird zum ersten Nachspülwasser nach Verwendung alkalischer Reiniger zugesetzt.

## ANWENDUNGSBEREICHE

**THERMOTON® N** dient der Neutralisation verschleppter Alkali-Reste aus dem Hauptspülgang mit maschinellen Reinigern sowie der Beseitigung von eventuellen Kalkablagerungen in der Spezialspülmaschine. Darüber hinaus verhindert **THERMOTON® N** die Braunfärbung von Instrumenten. Typische Einsatzbereiche sind die Instrumentenaufbereitung im OP-Bereich, in der Anästhesie und der Intensivstation. Auch in der Mikrobiologie und im Labor kann **THERMOTON® N** angewendet werden.

**THERMOTON® N** ist geeignet für RKI- (BGA-) sowie Vario-Programme und ist in allen Maschinentypen einsetzbar.

## DOSIERUNG

Im allgemeinen genügt eine Konzentration von 1 ml/Liter Spüllösung (0,1 %).

Bei starker Verschmutzung kann die Dosierung auf 3 ml/Liter Spüllösung (0,3 %) erhöht werden.

Die Zugabe erfolgt normalerweise automatisch über die Dosierpumpe.

## ZUSAMMENSETZUNG

Phosphorsäure, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren

## CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Aussehen des Konzentrates:	farblose Lösung
pH-Wert , Konzentrat:	0,8 + / - 0,4
Dichte (20 °C):	1,14 g/ccm + / - 0,010

## LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
5 L Kanister	3 x 5 L	-	00-140-050
10 L Kanister	1 x 10 L	-	00-140-100
30 kg Kanister	1 x 30 kg	-	00-140-300
200 kg Fassware	1 x 200 kg	-	-

## DOSIERHILFEN

Kanisterumfüllhahn, Dosierpumpe für Kanister.

## BESONDERE HINWEISE

Verursacht Verätzungen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

## ZERTIFIZIERUNG / REGISTRIERUNG

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

