

Tiutol® dent ... für den Dentalbereich

Eigenschaften

- Tiutol® dent
- Desinfektionsmittelkonzentrat mit hoher Reinigungskraft
- phenolfrei
- aldehydfrei
- für zahnärztliche Absauganlagen und Amalgamabscheider
- wirkt gegen Bakterien inkl. TbB und Pilze. Viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)¹⁾
- besitzt eine hohe Materialverträglichkeit und wirkt entschäumend

Wirkungsspektrum

- bakterizid inkl. TbB
- fungizid
- viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)¹⁾

Dosiertabelle

	Konz.	EZ
Tiutol® dent 5 Liter	3,0 %	60 Min.

Hinweise zur Anwendung

Tiutol® dent wird 3%ig, d. h. 30 ml auf 1 Liter kaltes Wasser, eingesetzt und über die Ansaugschläuche der Anlage zugeführt. Am besten täglich mittags und abends.

Lieferform	REF	PZN
5 Liter-Kanister	9325425	6166776



hohe Reinigungskraft

Tiutol® dent – Auszug aus den Produktinformationen

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Aktivchlor 3,9 g, Natronlauge, spezielle Stabilisatoren, Korrosionsschutz, Wasser.
Reinigung nach der Behandlung: Jeweils nach der Behandlung sind der Spraynebelschlauch sowie gegebenenfalls der Speichelzieher- und Chirurgieschlauch mit kaltem Wasser nachzuspülen. Hierzu schalten Sie einfach die Spülung des Mundspülbeckens ein und saugen das fließende Wasser über die oben aufgeführten Schlauchsysteme zwecks Reinigung der Zentrifugenkammer, der Luft-Wasser-Separation, der Siebe sowie der Fühler ab.
Sanitation von Absauganlagen und Amalgamabscheidern: Die Sanitationsmaßnahmen sind arbeitstäglich mittags und/oder abends durchzuführen.

a) Herstellung der Anwendungslösung

Zur Herstellung der Anwendungslösung von Tiutol® dent dosieren Sie mittels Dosierbecher oder Dosierpumpe (2 x 15 ml Hub) 30 ml Tiutol® dent auf einen Liter kaltes Wasser. Diese Anwendungslösungen führen Sie der Absauganlage und dem Amalgamabscheider mittels eines geeigneten Applikationssystems (z. B.

„Schlürfbecher“) über die jeweils eingesetzten Absaugschläuche zu. Mit verbliebenen Restmengen bzw. mit einer zusätzlich eingesetzten Gebrauchsverdünnung anschließend mit einer Bürste die Speischale reinigen.

b) Siebpflege

Bei Verwendung von Tiutol® dent ist es ausreichend, die Absaugsiebe, das Schalensieb der Speischale und bei vorhandenem Amalgamabscheider die Filterschublade mehrmals wöchentlich auf Verschmutzung zu kontrollieren. Gegebenenfalls sind diese nach fachgerechter Entsorgung des Inhalts zu reinigen. Zur desinfizierenden Reinigung verschmutzter Siebe hat es sich bewährt, diese mindestens eine Stunde in eine 3%ige Anwendungslösung von Tiutol® dent einzulegen. Auf dem Kanister aufgebrauchte Sicherheitshinweise sind zu beachten und die Anweisungen der Unfallverhütungsvorschrift, die beim Umgang mit nicht für die Haut bestimmten Desinfektionsmitteln das Tragen wasserdichter Schutzhandschuhe vorschreibt, sind zu befolgen.

Zusätzliche Hinweise: Zur Sanitation der Absauganlage inklusive Amalgamabscheider reicht allein Tiutol® dent aus, so dass Sie

keine weiteren Desinfektions- und Reinigungsmittel benötigen. Die zusätzliche Verwendung von Desinfektions- und Reinigungsmitteln neben Tiutol® dent kann vielmehr zu Korrosions-Schäden an der Anlage und zu Schaumbildung führen. Machen Sie daher bitte auch Ihre Raumpflegerkräfte darauf aufmerksam, dass keine Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, die außerhalb der Behandlungseinheit Verwendung finden, über die Speischale entsorgt werden. Tiutol® dent nach Ablauf des auf dem Kanister angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Vorsicht: Nicht zusammen mit anderen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln verwenden, da gefährliche Gase freigesetzt werden können. Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Verursacht schwere Verätzungen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Nicht mischen mit sauren oder säurehaltigen Mitteln. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

UBA-Nr.: 10390036

1) gem. RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01-2004